

PatientInnen-Information

Gut zu wissen
Schuheinlagen

BÄHLER 

Starthilfe...

Um Ihnen die «ersten Gehversuche» mit den neuen Einlagen zu erleichtern, haben wir Ihnen das Wichtigste kurz zusammengefasst.

Wie kommt die Einlage in den Schuh?

Bitte vergewissern Sie sich immer, dass Ihre Einlagen auf einer ebenen Fläche im Schuh liegen. Entfernen Sie, wenn immer möglich, vor dem Einfügen Ihrer Einlagen in die Schuhe, sämtliche lose oder eingebaute Fussbettungen und andere Polster. Die Ferse der Einlage sollte mit der Fersenkappe des Schuhs bündig sein.

Wie lange braucht der Fuss bis er sich an die Einlagen gewöhnt hat?

Ihr Fuss wird zwei bis drei Wochen benötigen, um sich an die Einlage zu gewöhnen. Es kann sein, dass Sie an den ersten Tagen die Einlagen nur wenige Stunden tragen können. Diese Tragedauer sollten Sie aber stetig steigern können. Nach rund zwei Wochen sollte es aber möglich sein, die Einlagen problemlos zu tragen. Sollten Sie sich innert dieser Frist nicht an die Einlagen gewöhnt haben, sich möglicherweise

Druckstellen bemerkbar machen oder sich der Tragekomfort aus irgendwelchen anderen Gründen als nicht perfekt erweisen, bitten wir Sie, bei uns telefonisch einen Kontrolltermin zu vereinbaren.

Kann man Einlagen noch verändern?

Unsere Spezialisten können an Ihren Einlagen auch im Nachhinein noch alle nötigen Korrekturen und Veränderungen vornehmen. Diese Anpassungen sind für Sie, im Rahmen der viermonatigen Garantiezeit, kostenlos.

Zahlt die Krankenkasse Einlagen?

Die Krankenkassen-Grundversicherung deckt die Kosten für eine Einlagenversorgung nicht ab. Zusatzversicherte haben jedoch die Möglichkeit, auf der Basis eines ärztlichen Rezeptes, zumindest einen Teil der Kosten, zurückerstattet zu erhalten.

...jederzeit für Sie da...

Orthopädie Bähler AG

CH-8008 Zürich

Kreuzstrasse 46
Tel. 044 266 61 61
Fax 044 266 61 62
info@baehler.com
www.baehler.com

CH-8008 Zürich

Seefeldstrasse 40

CH-8180 Bülach

Kasernenstrasse 8

CH-8620 Wetzikon

Bahnhofstrasse 196

CH-9000 St. Gallen

Rorschacher Str. 166



official orthopaedic partner



SVOT Mitglied des
 Schweizer Verbandes der
ASTO Orthopädie-Techniker